


((نحوه ضد عفونی کردن وسائل و تجهیزات پزشکی بامحلول میکروزد IDMAX))

* استفاده از محلول میکروزد IDMAX :

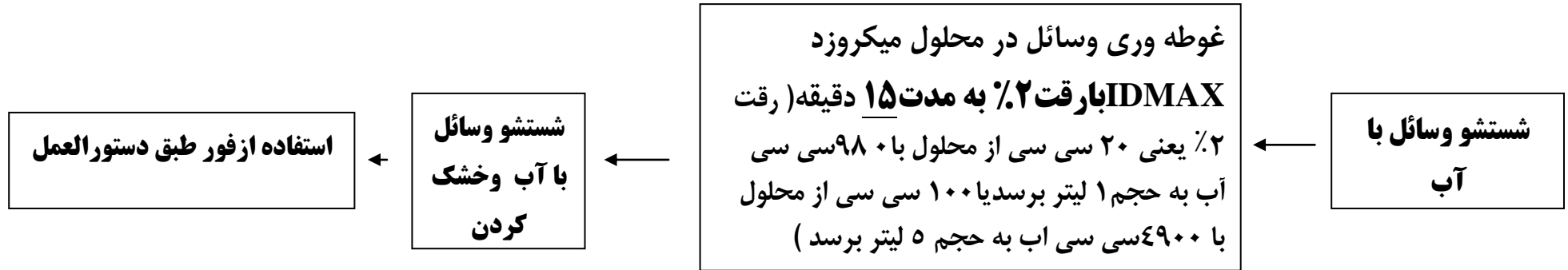

نکات مهم

- * تا اتمام دکونکس موجود در مرکز / پایگاه از میکروزد IDMAX استفاده نگردد.
- * کما فی السابق بر تاریخ انقضا مواد ضد عفونی همانند سایر اقلام نظارت نمایید
- * به هیچ عنوان از ضد عفونی کننده ابزار (میکروزد IDMAX و دکونکس ۵۳ پلاس و...) جهت ضد عفونی کف اتاق و تختها و سطوح استفاده نگردد. ضمنا میکروزید AF به عنوان ضد عفونی کننده سطوح دندانپزشکی توسط واحد مربوطه تامین شده است.
- * محلول رقیق شده میکروزد IDMAX در صورت عدم تغییر رنگ حداکثر تا ۱۰ روز (۷۰ تا ۸۰ بار) قابل استفاده می باشد
- * محلول میکروزد و دکونکس ۵۳ پلاس را مانند سایر ضد عفونی کننده ها دور از نور مستقیم خورشید و حرارت مستقیم و در حالت ایستاده نگهداری نمائید.
- * از استفاده همزمان این محصول با محصولات پایه الئیدی یا کلر دار یا پاک کننده انیونیک (شوینده خانگی) اجتناب نمایید